

c. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Materialien vorhanden sind:

- Fertipgen
- 1 Alkoholtupfer

Nicht im Karton enthalten:

- Wattebausch oder Gaze
- Pflaster
- Abfallbehälter für scharfe/spitze Gegenstände

2. Überprüfen des Fertipgens

- Stellen Sie sicher, dass Sie das korrekte Arzneimittel (Yuflyma) und die korrekte Dosierung haben.
- Sehen Sie sich den Fertipgen an und stellen Sie sicher, dass er nicht gebrochen oder beschädigt ist.
- Prüfen Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett des Pens.

Den Fertipgen **nicht** verwenden, wenn

- er gebrochen oder beschädigt ist.
- das Verfallsdatum abgelaufen ist.

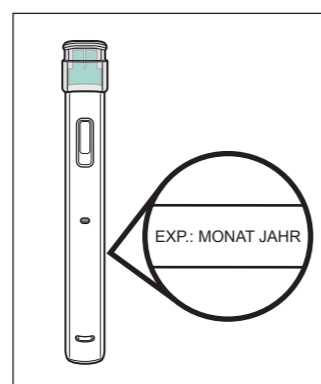


Abbildung B

3. Überprüfen des Arzneimittels.

- Sehen Sie durch das Fenster und stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit klar, farblos bis schwach braun und frei von Partikeln ist.
- Den Fertipgen nicht anwenden, wenn die Flüssigkeit verfärbt (gelb oder dunkelbraun) oder trüb ist oder Partikel enthält.
- Möglicherweise sind Luftblasen sichtbar. Das ist normal.

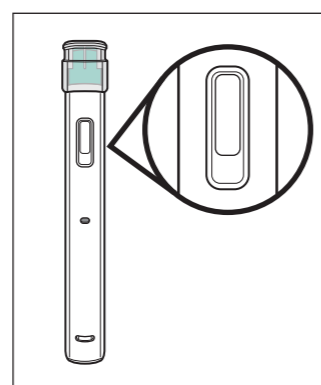


Abbildung C

4. Warten Sie 15 bis 30 Minuten

- Lassen Sie den Fertipgen für 15 bis 30 Minuten bei Raumtemperatur liegen, damit er sich erwärmen kann.
- Erwärmen Sie den Fertipgen **nicht** mithilfe von Wärmequellen wie heißes Wasser oder eine Mikrowelle.

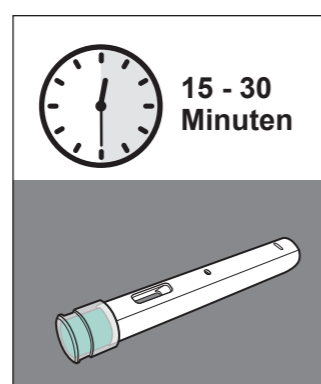


Abbildung D

5. Auswählen einer geeigneten Injektionsstelle

- Sie können in folgende Körperstellen injizieren:
 - die Vorderseite Ihrer Oberschenkel.
 - Ihren Bauch mit Ausnahme der 5 cm um den Nabel.
 - den äußeren Bereich Ihres Oberarms (NUR Betreuer).
- Nicht** in die Haut innerhalb von 5 cm um den Nabel oder in gerötete, verhärtete, druckempfindliche oder geschädigte Haut, blaue Flecken oder vernarbte Haut injizieren.
- Wenn Sie an Psoriasis leiden, nicht direkt in verdickte, gerötete oder schuppige Hautstellen oder Läsionen auf Ihrer Haut injizieren.
- Spritzen Sie **nicht** durch Kleidung.
- Wechseln Sie die Injektionsstelle jedes Mal bei Verabreichung einer Injektion. Jede neue Injektionsstelle sollte mindestens 3 cm von der vorherigen Injektionsstelle entfernt sein.

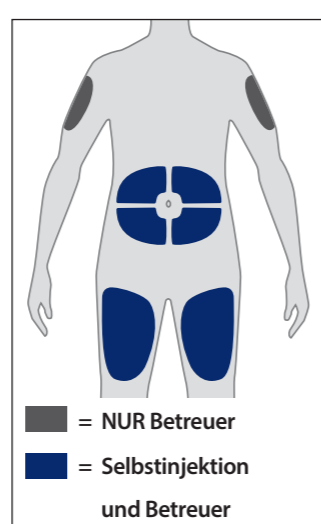


Abbildung E

6. Waschen der Hände

- Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie sorgfältig ab.

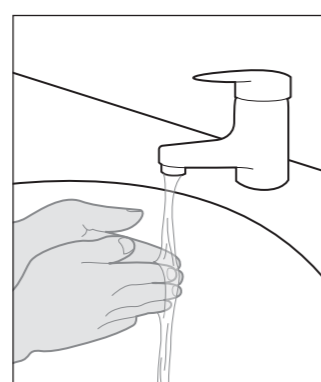


Abbildung F

7. Reinigen der Injektionsstelle

- Reinigen Sie die Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer in einer kreisförmigen Bewegung
- Lassen Sie die Haut vor dem Injizieren trocknen.
- Blasen Sie vor der Injektion nicht auf die Injektionsstelle und berühren Sie sie vor der Injektion nicht mehr.



Abbildung G

8. Entfernen der Kappe

- Halten Sie den Fertipgen mit einer Hand am Injektionskörper mit der Kappe nach oben. Ziehen Sie die Kappe vorsichtig mit der anderen Hand gerade ab.
- Entfernen Sie die Kappe **erst unmittelbar** vor der Injektion.
- Berühren Sie **nicht** die Nadel oder Nadelschutzkappe. Dies kann zu einer Nadelstichverletzung führen.
- Setzen Sie die Kappe **nicht** wieder auf den Fertipgen. Entsorgen Sie die Kappe sofort in den Abfallbehälter für scharfe/spitze Gegenstände.

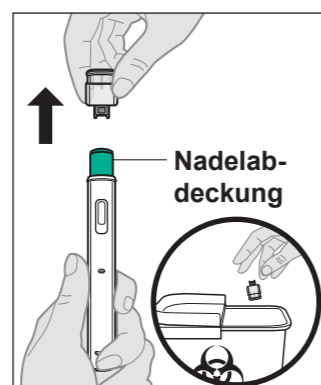


Abbildung H

9. Platzieren Sie den Fertipgen auf der Injektionsstelle.

- Halten Sie den Fertipgen so, dass Sie das Fenster sehen können.
- Platzieren Sie den Fertipgen über die Injektionsstelle in einem Winkel von 90 Grad, ohne die Haut zusammenzudrücken.

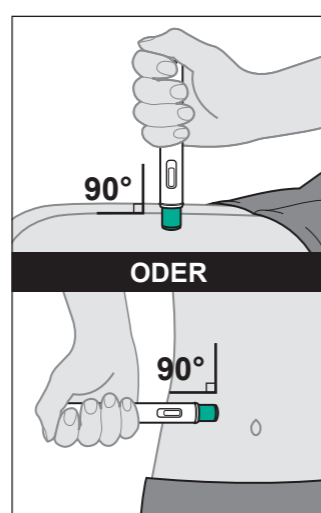


Abbildung I

10. Verabreichen der Injektion

- Drücken Sie den Fertipgen **fest** gegen die Haut. Wenn die Injektion beginnt, hören Sie das 1. laute „Klicken“ und der blau Kolben beginnt das Fenster zu füllen.
- Halten Sie den Fertipgen fest gegen die Haut gedrückt und achten Sie auf das 2. laute „Klicken“.
- Nach dem Sie das 2. laute „Klicken“ gehört haben, halten Sie den Fertipgen weiterhin fest gegen die Haut gedrückt und zählen Sie langsam mindestens bis fünf, um sicherzustellen, dass die Dosis vollständig injiziert wird.
- Verändern Sie **nicht** die Position des Fertipgens, nachdem mit der Injektion begonnen wurde.

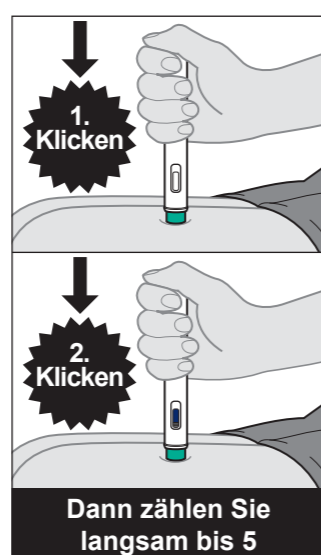


Abbildung J

11. Entfernen des Fertipgens von der Injektionsstelle und Versorgung der Injektionsstelle

- Sehen Sie sich den Fertipgen an und bestätigen Sie, dass der blaue Kolben mit der grauen Oberseite das Fenster vollständig ausfüllt.
- Entfernen Sie den Fertipgen von der Injektionsstelle.
 - Nach Entfernen des Fertipgens von der Injektionsstelle wird die Nadel automatisch abgedeckt. **Setzen Sie die Kappe nicht** wieder auf den Fertipgen.
 - Wenn das Fenster nicht vollständig blau geworden ist oder sich die Injektion des Arzneimittels fortsetzt, bedeutet das, dass Sie keine vollständige Dosis erhalten haben. Setzen Sie sich umgehend mit Ihrer medizinischen Fachkraft in Verbindung.
- Behandeln Sie die Injektionsstelle, indem Sie vorsichtig einen Wattebausch oder eine Gaze auf die Injektionsstelle drücken, ohne zu reiben, und bringen Sie bei Bedarf ein Pflaster an. Es kann etwas bluten.
 - Verwenden Sie den Fertipgen nicht noch einmal.
 - Reiben Sie nicht an der Injektionsstelle.

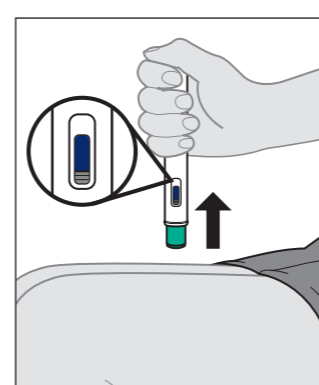


Abbildung K

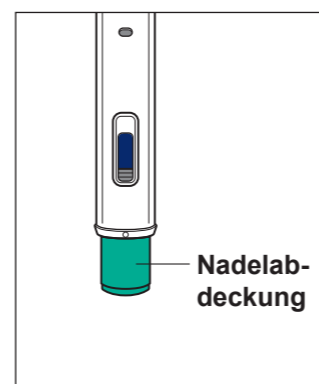


Abbildung L

12. Entsorgen des Fertipgens

- Werfen Sie den gebrauchten Fertipgen in einen speziellen Abfallbehälter für scharfe/spitze Gegenstände entsprechend den Anweisungen Ihres Arztes, des medizinischen Fachpersonals oder Ihres Apothekers.
- Der Alkoholtupfer und Verpackungsmaterial können in Ihrem Haushaltsabfall entsorgt werden.
- Bewahren Sie den Fertipgen und den speziellen Behälter für scharfe/spitze Abfälle für Kinder unzugänglich auf.

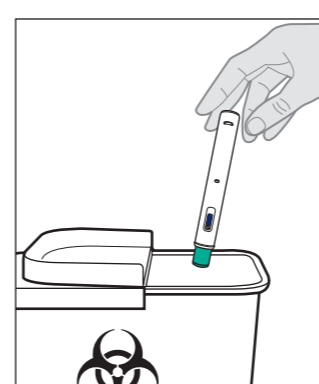


Abbildung M